


Instructions de montage

Composition du kit :

- 1 montant en aluminium
- 1 visière transparente
- 1 ruban de fixation

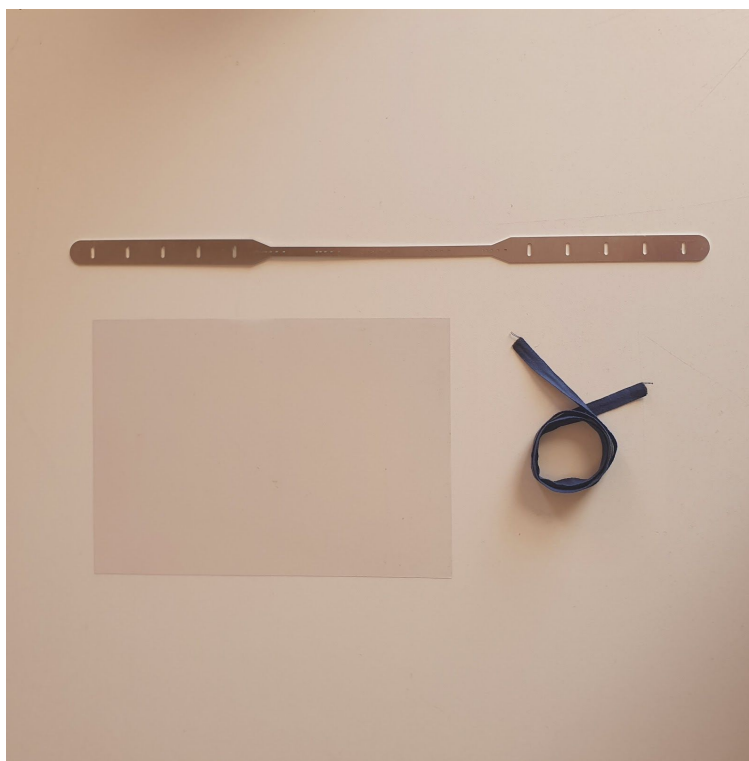


Matériel nécessaire :


- préparez une agrafeuse avant de commencer le montage (la visière est compatible avec plusieurs tailles d'agrafes)



1. Centrez la visière sur le montant :
(laisser dépasser de 5mm environ au dessus du montant)

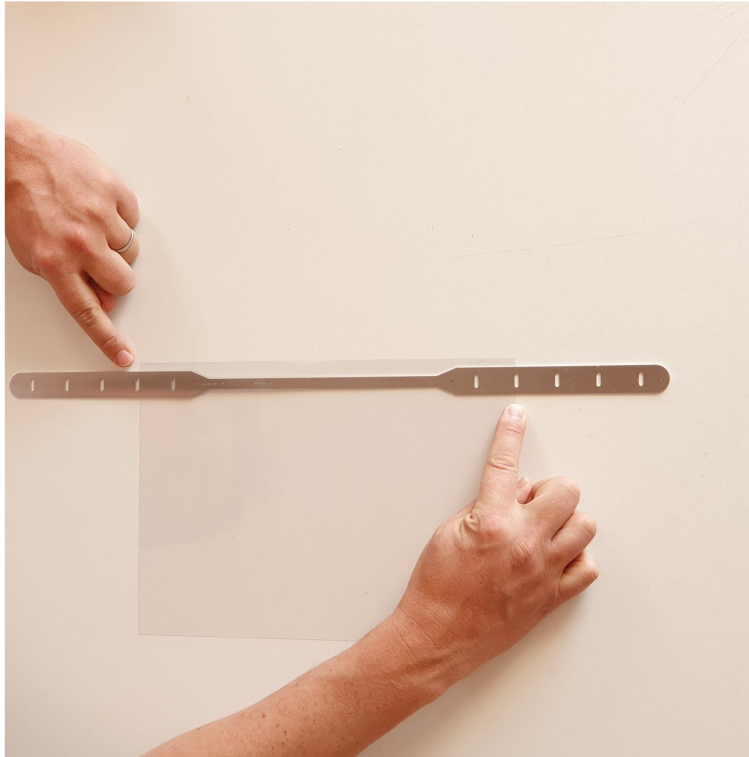


2. Agrafez la visière au montant en commençant par les 2 extrémités :
(côté plein de l'agrafe à l'extérieur de la visière,
sélectionnez la paire de trou adaptée à la taille de vos agrafes)

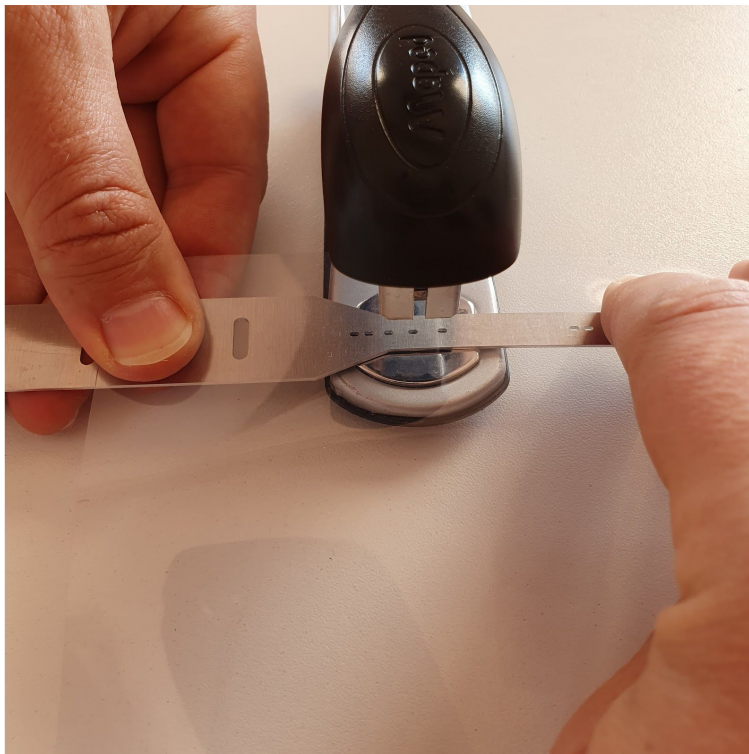


3. Pliez délicatement le montant à la forme souhaitée :

(vous pouvez utiliser votre front pour que la forme soit parfaitement adaptée à votre crâne : appuyez légèrement au niveau des tamps jusqu'au contact des parties latérales au-dessus de vos oreilles. Nous conseillons de laisser la face avant la plus plate possible pour le confort visuel)

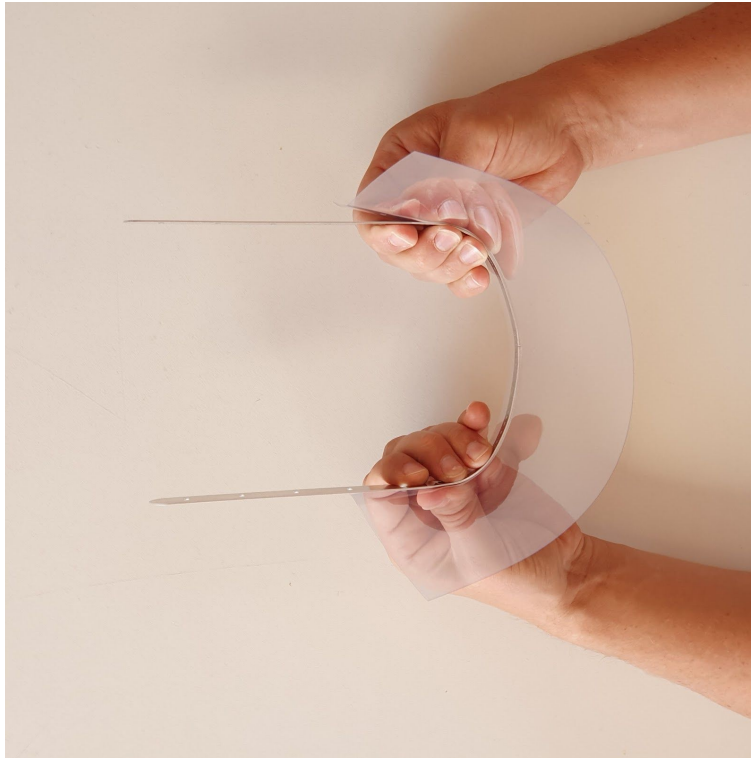

4. Insérer le ruban dans le montant :

(Sélectionnez les trous en fonction de la taille de votre crâne et de l'écart souhaité entre la visière et le visage)

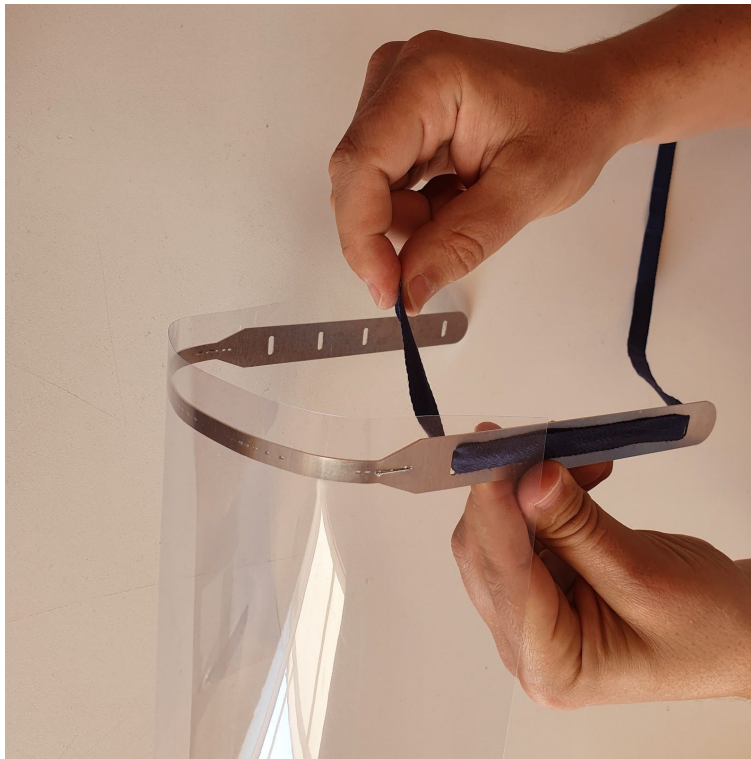

5. La visière est prête à être portée en effectuant un noeud derrière la tête :

